



HydraBeauty


6 Uygulama Tek Ünitede

**Hydrafacial - Elmas Dermabrazyon - Oksijen Sprey
Photon Terapi - Bio Mikro Akım Lifting - Vakum Kalem**

Etki Mekanizması


Hydrafacial uygulaması, özel olarak tasarlanmış vortex spiral kanallı uygulama başlığı tarafından cihazdan gelen özel cilt solüsyonları ile cildin bir yandan yıkanması bir yandan kırılmış ve ölü deri ihtiva eden solüsyonun vakum etkisi ile çekilerek cihazın kirli haznesine atılması işlemidir.

Hydra facial cilt bakım cihazı ile gerçekleştirilen bu uygulamada ciltteki gözenekler açılır, ölü deri peeling etkisi yok edilir ve özel olarak hazırlanmış solüsyonların cilt tarafından emilimi sağlanır. Hydrafacial uygulaması bir işlemler zinciri şeklinde yapılır.

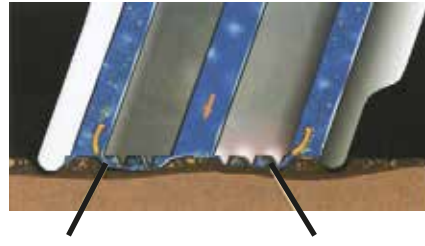

Ölü hücreler ve kirler vakumlanarak çekilir

Hydrafacial vortex kanallı uçlar cildi peeling etkisiyle kazır

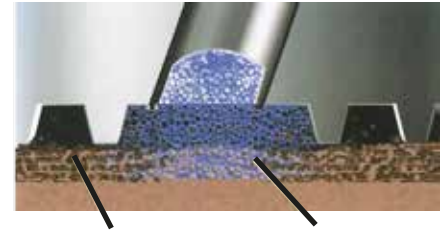

Özel serum cildi yumuşatır, yağları ve kirleri çıkarır

Serum cildi temizler ve nemlendirir


Uygulama Alanları:



Kırışıklıklar




Sarkmış ciltler

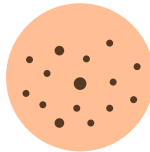

Siyah noktalar



Gözenekler

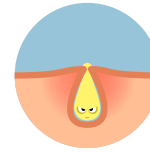

Yağlı ciltler



Yıpranmış ciltler

Fonksiyonlar:



Hidra Facial

Hidrafacial uygulaması, vortex spiral kanallı bir başlık ile yapılır. Cihazın üzerinde bulunan solüsyon haznelerinden başlığa gelen solüsyon spiral kanal ile cilde emdirilir ve kopan ölü deri parçaları ciltte biriken kir ve yağ vakumla beraber çekilip atılır.



Bio Mikro Akım Lifting

Zayıf elektrik akımları ile kasları çalıştırmak bilinen en eski ve en etkili lifting yöntemidir. Özellikle egzersiz ile çalıştırmanın mümkün olmadığı yüz kaslarında bu yöntem oldukça iyi sonuç verir.



Oksijen Sprey

Saf oksijen gazı ile, oksijen sprej başlığı haznesi içine konulan C vitamini serumu cilde püskürtülür. %10 askorbik asit içerikli C vitamini serumu ciltte anti oksidan özellik sağlar.



Elmas Dermabrazyon

Elmas dermabrazyon uygulaması, vakumlu başlık ucuna monte edilen yüzeyi aşındırıcı bir malzeme ile kaplı uçlar tarafından ciltteki ölü derinin soyulması işlemidir.



Photon Terapi

Cihazda 4 adet foton terapi başlığı bulunur. Her başlık kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere 3 farklı renk ve bu renklerin karışım kombinasyonlarını verebilir. Her renk ışık farklı cilt problemlerinin çözümünde kullanılır.



Vakum Kalemi

Uygulama sonrasında kan dolaşımını hareketlendirmek için kullanılır.